



AB Sustentable
Ambiental
Pensamos, sentimos y actuamos sustentablemente

Marca: Bata desechable no estéril
CÓDIGO DEL PRODUCTO: ABM-SMMS



DESCRIPCIÓN: Bata con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho, tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos antiestática y resistente a la tensión. No estéril y desechable.

USO:

Este producto es ideal para hospitales, clínicas, consultorios y demás instituciones de salud.

NORMAS

NMX-A-025-INNTEX-2017

NMX-A-047-INNTEX-2013

CUIDADOS

Este producto está diseñado para uso de una sola vez.

No utilizar para soldadura, metales fundidos corte o quemaduras con acetileno, rayos láser o como protección contra niveles dañinos de radiación infrarroja.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en polipropileno no tejido
- De un solo uso
- No estéril
- Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos
- Antiestática
- Preventivo en el riesgo de contagio

ESPECIFICACIONES

Color: Azul

Talla: Mediano

Empaque individual: 1 bolsa

MATERIALES


Material: Polipropileno



1.-Se lava las manos cumpliendo las medidas de bioseguridad



2.-Abra el empaque de la bata

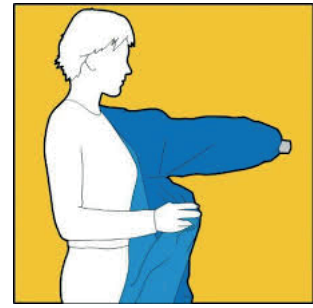

3.-Tome la bata introduzca un brazo y luego el otro.



4.-Asegure la bata ajustando



5.-Una vez utilizada, retirar cuidadosamente enrollando la bata sobre la superficie, asegurándose de que ninguna superficie contaminada toque manos o piel desprotegida.



6. Desechar en contenedores designados para residuos de infección.